

# USO DELLA STAFFA DI TRAZIONE

La staffa di trazione è composta dalle seguenti parti.



1 - Bullone di fissaggio del filo K.

2 - Bracci della staffa

3 - Dado di tensionamento

4 - Gancio per l'ancoraggio alla barra di trazione

I bulloni di fissaggio del filo K sono composti da una vite forata e un dado



---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Inserire un filo di Kirschner della misura adeguata attraverso il segmento osseo da trazione e inserire le sue estremità nel foro della vite



---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Inserire la vite nel foro del braccio delle staffe e serrarla con il dado



---

---

---

---

---

---


---

---

---

---

Al termine della procedura il collegamento tra la staffa di trazione e il segmento osseo dovrebbe essere il seguente

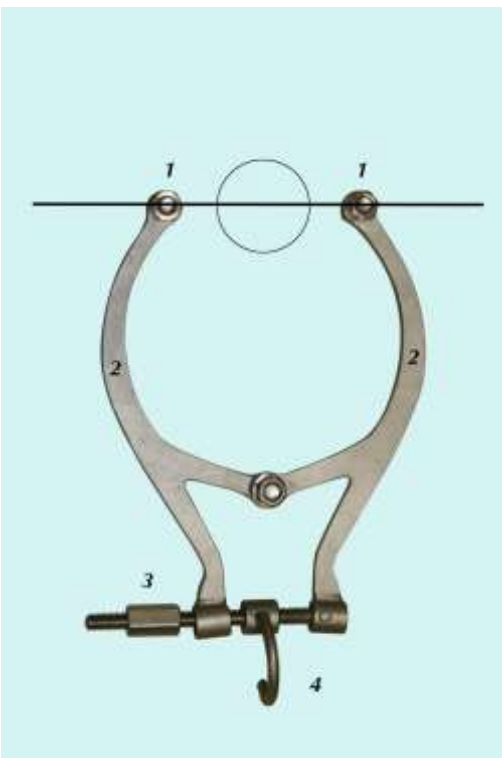

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

